

Procédure FLOQSwabs



Analysis Expertise

1 rue Léo Valentin
88000 Epinal

03 29 30 30 10

Ouvrir le tube pour libérer la partie haute de l'écouvillon et la présenter au salarié.
Lui demander de **frotter la face interne de la joue et de la gencive** pendant 30 secondes de chaque côté puis de nouveau 30 secondes en plaçant l'écouvillon **sous la langue**.



Coller une des deux premières étiquettes sur le tube en cas **d'analyse de confirmation (EXP)** ou une des deux dernières étiquettes en cas de **contre-expertise (CEXP)**.



Insérer la pochette matelassée dans **l'enveloppe de transport Chronopost préaffranchie**. Déposer dans le bureau de Poste le plus proche.

1



2

Après prélèvement, **remettre l'écouvillon dans son tube**.



3

Coller une des deux premières étiquettes sur le tube en cas **d'analyse de confirmation (EXP)** ou une des deux dernières étiquettes en cas de **contre-expertise (CEXP)**.



Insérer la pochette matelassée dans **l'enveloppe de transport Chronopost préaffranchie**. Déposer dans le bureau de Poste le plus proche.

4

Insérer le tube de prélèvement dans la pochette matelassée. **Stocker à + 4°C si l'envoi n'est pas immédiat**.



5